

# POMOCNÝ SCHŮDEK TELESKOPICKÝ

**Model No.: BG-T-2010**

## **návod k použití**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Pomocný schůdek usnadňuje vstupování do vany, mohou je používat děti aby snáze dosáhli k umyvadlu atd. Je vybaven hygienickou protiskluzovou stoupací plochou se zaoblenými hranami a gumovými koncovkami nohou proti skluzu.

### **Důležité pokyny**

Je bezpodmínečně nutné uschovat tyto pokyny pro pozdější použití! Před prvním použitím zakoupeného zboží si pozorně přečtěte návod k použití, především bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte pro pozdější upotřebení. Pokud předáte produkt třetí osobě, předejte společně s ním i návod k použití.

Předložený návod k použití je určen pro tento výrobek a obsahuje informace důležité pro jeho sestavení a manipulaci. Přečtěte si celý návod.

Nerespektování pokynů uvedených v návodu může vést k vážným úrazům nebo poškození výrobku.

### **Důležité**

- Maximální zatížení schůdku činí 100 kg! Tento výrobek nesmí používat více osob současně.
- Výška schůdku je stavitelná ve třech úrovních od 21 cm do 26 cm. Před použitím se přesvědčte zda jsou všechny čtyři zajišťovací kolíčky zacvaknuty.
- Používejte schůdek v souladu s účelem jejího použití a respektujte přitom tento návod.
- Neprovádějte žádné změny konstrukce a nepoužívejte výrobek společně s jinými kusy nábytku nebo jinými částmi jiných zařízení.
- Nepřipevňujte žádné dodatečné části.
- Tento výrobek je zkonstruován pouze pro soukromé používání v domácnosti. Není vhodný pro jakýkoli způsob komerčního použití (např. v nemocnicích, domovech důchodců atd.)
- Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, a proveďte kontrolu správného upevnění sešroubovaných částí. V případě pochybností výrobek nepoužívejte, hrozí nebezpeční úrazu.
- Svévolně neprovádějte žádné opravy, v takovém případě by zanikl nárok na uplatnění záruky.
- Za účelem provedení opravy kontaktujte autorizované servisní pracoviště.
- Je-li výrobek používán dětmi, nebo v blízkosti dětí či osob, jimž v užívání brání nějaké omezení, pak by měla být v dosahu dozorující osoba (a popř. pomocná síla). Tento výrobek není hračka.
- Dbejte na to, aby byl schůdek vždy umístěn na stabilní podkladové ploše.
- Obalový materiál nenechávejte v blízkosti dětí. Hrozí nebezpeční udušení!

## **Obsah dodávky a obal**

Nejdříve, prosím, zkontrolujte, zda je obsah dodávky kompletní a zda je dodané zboží bez závad. V případě pochybností výrobek nepoužívejte a kontaktujte servisní pracoviště. Součástí balení jsou: 1 x stoupací plocha, 2 x noha, sáček s montážními šrouby a návod k použití. Pokud při rozbalování výrobku zjistíte závadu způsobenou při transportu, ihned kontaktujte svého prodejce.

## **Pokyny k montáži schůdku**

Obě nohy přišroubujte ke stoupací ploše pomocí montážních šroubů, které jsou součástí balení. Pro uchycení každé nohy slouží jeden šroub a dva vruty. Šrouby dotáhněte pomocí imbusového klíče. Otvory pro vruty nejsou ve stupátku předvrtané, pro jejich montáž použijte šroubovák a na počátku montáže mírně na šroubovák zatlačte. Šrouby i vruty dostatečně, ale s citem, dotáhněte tak, aby nedošlo ke stržení závitu.

## **Varování**

Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen a proveďte kontrolu správného upevnění sešroubovaných částí. V případě pochybností výrobek nepoužívejte, hrozí nebezpečí úrazu!

## **Údržba**

K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, nečistoty a prach odstraňujte měkkým popř. lehce navlhčeným hadříkem. V případě výskytu silného znečištění použijte běžný neutrální čisticí prostředek. Po očištění vlhkým hadříkem a po každém použití schůdek důkladně osušte.

## **Technické údaje**

Velikost stoupací plochy: 40 x 23 cm

Výška schůdku: 21 až 26 cm

Maximální nosnost: 100 kg

## **Ochrana životního prostředí**

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## **Servis**

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## **Záruka se nevztahuje**

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.